

 **TOPSILMED**

Solutions for a healthy future

# BLIZCARE<sup>®</sup> Regular



skuteczna pomoc  
w leczeniu blizn

[www.blizcare.pl](http://www.blizcare.pl)



Oferta medycznych produktów wspomaganie leczenia blizn, w linii **BLIZCARE®** Regular, przeznaczona do użytku dla całej Twojej rodziny, bez względu na sposób powstania bliny oraz wiek użytkownika.

Plastry **BLIZCARE®** Regular to produkty przeznaczone do wspomaganie i leczenia blizn pooperacyjnych, pooparzeniowych, pourazowych oraz rozstępowych. Są hipoalergiczne, przezroczyste, szybko wysychające preparaty. Tworzą na powierzchni skóry cienką, oddychającą, nieprzepuszczalną dla wody membranę, utrzymując tym samym właściwą wilgotność skóry, przez co zapobiegają powstawaniu blizn przerostowych i bliznowców. Najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z naszych produktów:

## Produkty **BLIZCARE®**

- Wspomagają leczenie w łatwy i prosty sposób.
- Praktycznie nie posiadają działań i skutków ubocznych.
- Mogą być bezpieczne stosowane przez dzieci i dorosłych.
- Posiadają właściwości oddychające i hipoalergiczne.
- Zapobiegają nadmiernemu wzrostowi tkanki bliznowatej.
- Spłaszczają i zmiękczejają bliznę.
- Pomagają zredukować rozmiar i wygląd blizny.
- Zwiększają elastyczność skóry.
- Zmniejszają świąd i ból.

**Silikonowe, medyczne produkty BLIZCARE® Regular są bezpieczne i skuteczne** dzięki precyzyjnym dopasowaniu wielkości plastra do powierzchni blizny. Stosowanie s skutecznie poprawić wygląd i stan blizny, dbając o komfort całej rodziny.

# BLIZCARE® Regular

skuteczna pomoc  
w leczeniu blizn

**BLIZCARE® Regular** - linia produktów medycznych, kierowana jest do ogólnego stosowania. Wspomaga leczenie blizn po wygojeniu się rany. Produkty można stosować na blizny pooperacyjne, pooparzeniowe, pourazowe oraz innego rodzaju blizny np. po usunięciu tatuażu. Stanowią skuteczną, nowoczesną oraz nieinwazyjną metodę leczenia blizn dla całej rodziny.

## Portfolio produktów **BLIZCARE® Regular**



**BLIZCARE® Regular** Żel pojemność: 15 g  
1 sztuka w opakowaniu

- Żel stosujemy po całkowitym zagojeniu się rany
- Żel nakładamy na umytą i osuszoną powierzchnię skóry
- Należy nanieść niewielką ilość żelu i rozsmarować, aby uzyskać cienką warstwę całkowicie pokrywającą powierzchnię blizny
- Żelu nie należy stosować w miejscach narażonych na mechaniczne starcie go z powierzchni blizny
- Żel stosujemy minimum 2 x dziennie



**BLIZCARE® Regular** Plastry w kształcie prostokąta  
5 sztuk w opakowaniu, o wymiarach 7cm x 3cm



**BLIZCARE® Regular** Plastry w kształcie kwadratu  
5 sztuk w opakowaniu, o wymiarach 8cm x 8cm



**BLIZCARE® Regular** Plastry w kształcie prostokąta  
5 sztuk w opakowaniu, o wymiarach 15cm x 4cm



**BLIZCARE® Regular** Plastry w kształcie prostokąta  
5 sztuk w opakowaniu, o wymiarach 25cm x 5cm

ne, są również niezwykle praktyczne – jeśli zaistnieje taka potrzeba, możliwe jest silikonowych preparatów to nieinwazyjna metoda w leczeniu blizn – pomagają

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą silikonowych produktów medycznych w trzech kategoriach: **Regular**, **PRO** oraz **BIO**

# BLIZCARE®



## Zadbaj o swoją bliznę

skutecznie

profesjonalnie

naturalnie

**BLIZCARE®** to produkt polski, wytwarzany w nowoczesnej polskiej fabryce TOPSIL Med - firmy z wieloletnim doświadczeniem w produkcji wyrobów z silikonu. Produkty **BLIZCARE®** produkowane są z wysokiej jakości surowca, silikonu medycznego z atestami do wykorzystania w medycynie z gwarancją wysokiego profilu bezpieczeństwa.

### Na co warto zwrócić uwagę stosując produkty BLIZCARE®

- Zaleca się stosowanie **jednego plastra przez okres max. 5-7 dni**
- W zależności od wieku oraz rodzaju blizny **proces może trwać ok. 3-6 miesięcy**
- Aplikacja plastra w miejscach ruchomych (np. kolano, łokieć, nadgarstek, kostka lub pięta) – może wymagać zmiany **plastra na nowy co 2-3 dni**
- Przy każdej zmianie plastra, skóra **musi być dokładnie umyta oraz osuszona** przed kolejną aplikacją
- Ze względu na swoje właściwości wodoodporne (hydrofobowość), plaster odporny jest na zachłapanie **wodą**. Nie zaleca się utrzymywania plastra pod wodą przez dłuższy czas.
- Ze względu na **delikatną strukturę plastra** zaleca się szczególną uwagę na jego prawidłowe rozpakowanie oraz aplikację na skórę
- Jeśli zaistnieje potrzeba, **plaster może być docięty** do rozmiaru blizny



Zobacz film w jaki sposób aplikować plastry na naszej stronie [www.blizcare.pl](http://www.blizcare.pl)



Topsil Med. Sp. z o.o., ul. Graniczna 6, Słubica B, 96-321 Żabia Wola, Polska